

PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ (PDT)

Tüm yöntemler endoskopik izlemeyi ve sürekli ventilasyonu kolaylaştırır. Her bir yöntem için, size iyi eşleşen setleri ve ayrı sipariş edilebilen kapsamlı set bileşeni yelpazesini sunabiliriz.

Kullanım amacına göre setler kombine edilebilir. PercuQuick ve PercuTwist setleri önceden yapılandırılmıştır;

“Solo set” ile tüpü seçersiniz. Yüksek kalitedeki trakeostomi tüpleri özellikle ilgili dilatörlere uyarlanan uçlarla teslim edilir. Isıya duyarlı malzemelerin, hidrofilik kaplama ve esnek sabitleme flanşlarının kullanımı sayesinde bu trakeostomi tüpleri, PDT için özel olarak geliştirilen takma dilatörleri ile en iyi tercihtir.

GELENEKSEL YÖNTEM:

PERCUQUICK ÇOK ADIMLI DILATÖR SETİ

Hassas adım adım dilasyon, enfeksiyonların azaltılmasına ve mükemmel kozmetik sonuçlarla birlikte hızlı iyileşmeye yardımcı olur.

HEPSİ BİR ARADA YÖNTEM:

PERCUQUICK TEK ADIMLI DILATÖR

Dilasyon, yalnız tek bir alet ile yürütülür. Sonuçlar, Çok Adımlı yöntem ile elde edilenlerle karşılaştırılabilir.

DEVRİMSEL YÖNTEM:

PERCUTWIST TEK ADIMLI DILATÖR

Bu patentli yeni tek adımlı dilatör, perkütan trakeostomiye ilk defa olarak kontrol edilebilir ve gerçekten güvenli bir prosedür haline getirdi.


PERCUTWIST TEK ADIMLI YÖNTEM



PERCUQUICK ÇOK ADIMLI YÖNTEM



PERCUQUICK TEK ADIMLI YÖNTEM

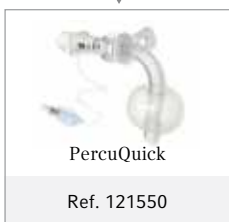

PDT TRAKEOSTOMİ TÜPÜ SETLERİ

PERCUQUICK PDT

RÜSCH

I.Ç. (MM)	D.Ç. (MM)	TOPLAMUZUNLUK (CLL=A+B+C)	BOY. A (MM)	BOY. B (MM)	BOY. C (MM)	AÇI Ø (YAKL.)	KAF Ø (MM)
7,0	10,7	81,0 mm	42,0	47,0	28,0	90°	27
8,0	11,7	98,0 mm	42,0	57,0	35,0	90°	32
9,0	12,7	117,0 mm	42,0	77,0	35,0	90°	32



SET BİLEŞENLERİ

- düşük basınç kablı trakeostomi tüpü
- basit ve güvenli kitleme mekanizmalı hareketli sabitleme flanşı
- konforlu boyun bandı
- giriş dilatörü
- steril
- tek kullanımlık

REF.	SİPARİŞ BOYU	MKTR
121550	7,0/8,0/9,0	1

TRACHEOFIX PDT

RÜSCH

I.Ç. (MM)	D.Ç. (MM)	TOPLAMUZUNLUK (CLL=A+B+C)	BOY. A (MM)	BOY. B (MM)	BOY. C (MM)	AÇI Ø (YAKL.)	KAF Ø (MM)
7,0	9,0	70,0 mm	-	-	70,0	78°	27
8,5	10,3	78,0 mm	-	-	78,0	86°	27
10,0	12,3	86,0 mm	-	-	86,0	90°	32



SET BİLEŞENLERİ

- düşük basınç kablı trakeostomi tüpü
- esnek sabitleme flanşı
- konforlu boyun bandı
- giriş dilatörü
- steril
- tek kullanımlık

REF.	SİPARİŞ BOYU	MKTR
121501	7,0/8,5/10,0	1

ULTRA TRACHEOFLEX PDT

RÜSCH

I.Ç. (MM)	D.Ç. (MM)	TOPLAMUZUNLUK (CLL=A+B+C)	BOY. A (MM)	BOY. B (MM)	BOY. C (MM)	AÇI Ø (YAKL.)	KAF Ø (MM)
7,0	10,4	63,0 mm	32,0	3,0	28,0	90°	22
8,0	11,4	88,0 mm	32,0	21,0	35,0	90°	24
9,0	12,4	117,0 mm	42,0	40,0	35,0	90°	25



SET BİLEŞENLERİ

- düşük basınç kablı, spiralli trakeostomi tüpü
- basit ve güvenli kitleme mekanizmalı hareketli sabitleme flanşı
- konforlu boyun bandı
- giriş dilatörü
- steril
- tek kullanımlık

REF.	SİPARİŞ BOYU	MKTR
120348	7,0/8,0/9,0	1

CRYSTALCLEAR PDT

RÜSCH

I.Ç. (MM)	D.Ç. (MM)	TOPLAMUZUNLUK (CLL=A+B+C)	BOY. A (MM)	BOY. B (MM)	BOY. C (MM)	AÇI Ø (YAKL.)	KAF Ø (MM)
7,5	10,0	70,0 mm	29,2	-	40,8	95°	21
8,5	11,3	81,0 mm	35,5	-	45,5	95°	28
9,5	12,7	87,0 mm	39,9	-	47,1	95°	28



SET BİLEŞENLERİ

- düşük basınç kablı trakeostomi tüpü
- esnek sabitleme flanşı
- konforlu boyun bandı
- giriş dilatörü
- steril
- tek kullanımlık

REF.	SİPARİŞ BOYU	MKTR
121502	7,0/8,0/9,0	1

PERCUTWIST



DEVRİMSEL YÖNTEM:

PERCUTWIST TEK ADIMLI DİLATÖR

Güvenli, hızlı, nazik: Bu patentli tek adımlı dilatör, perkütan trakeostomiyi ilk defa kontrol edilebilir ve gerçekten güvenli bir prosedür haline getirdi ve böylece yeni bir standart ortaya koydu. Şaşırtıcı şekilde basit ve nazik bir uygulamayla teslim edilmektedir. Trakeostomunun normdaki en iyi kozmetik sonuçlarla hızlı şekilde iyileştirilmesi. Dilasyon dişine sahip benzersiz tasarımı bir yandan basit döndürme aracılığıyla aynı anda dilasyon gerçekleştirirken trakeal anterior duvarın kaldırılmasını mümkün kılar. İstendiği zaman dilasyon yerinin kısıtlanmayan endoskopik görünümü temin edilir.



- hidrofilik kaplama penetrasyon için gereken kuvveti azaltır
- üç farklı çap, dokuya penetrasyon sırasında dönen kuvvetlerin en uygun uygulanmasını mümkün kılar

Pratik ve zaman tasarruflu: PercuTwist Set, her ikisi de eşit derecede uyumlu olan PercuQuick veya CrystalClear trakeostomi tüpü ile kullanıma sunulmuştur.

Serbest tercih: PercuTwist SOLO Set ile uygulamaya bağlı olarak tüpü seçersiniz. Tüp, takılan dilatöre hassas şekilde uyur ve böylece stomadan düzgün ve nazik bir şekilde takılır.

PERCUTWIST AKSESUARLARI

Tüm ürünler ayrı steril ambalajdadır.

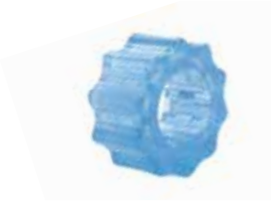PERCUTWIST XXL SAP			RÜSCH
	REF.	AÇIKLAMA	MKTR
	121558	torku artırmak için PercuTwist dilatöre takılacak sap • steril, tek kullanımlık	2
İLK ADIM DİLATÖRÜ			RÜSCH
	REF.	AÇIKLAMA	MKTR
	121503	soluk borusu D.Ç.'in başlangıç dilasyonu için dilatör 2,2 – 6 mm • steril, tek kullanımlık	5

EKSİKSİZ SETLER

PERCUQUICK İÇEREN PERCUTWIST SET



SET BİLEŞENLERİ

- PercuTwist dilatör
- takma dilatörü içeren PercuQuick trakeostomi tüpü
- J uçlu ve takma yardımcı kılavuz tel
- delme kanülü 17G x 70mm/14G x 52mm
- neşter
- Luer-kilitli şırınga
- boyun bandı
- lateks içermez
- steril
- tek kullanımlık

REF.	EBAT MM	MKTR
121555	7,0/8,0/9,0	1

CRYSTALCLEAR İÇEREN PERCUTWIST SET



SET BİLEŞENLERİ

- PercuTwist dilatör
- takma dilatörü içeren CrystalClear trakeostomi tüpü
- J uçlu ve takma yardımcı kılavuz tel
- delme kanülü 17G x 70mm/14G x 52mm
- neşter
- Luer-kilitli şırınga
- boyun bandı
- lateks içermez
- steril
- tek kullanımlık

REF.	EBAT MM	MKTR
121556	7,0/8,0/9,0	1

KOMBİNASYON İMKANLARI


PERCUTWIST SOLO SET



SET BİLEŞENLERİ

- PercuTwist dilatör
- J uçlu ve takma yardımcı kılavuz tel
- delme kanülü
- neşter
- Luer-kilitli şırınga
- boyun bandı
- lateks içermez
- steril
- tek kullanımlık

REF.	EBAT MM	MKTR
121557	7,0/8,0/9,0	1

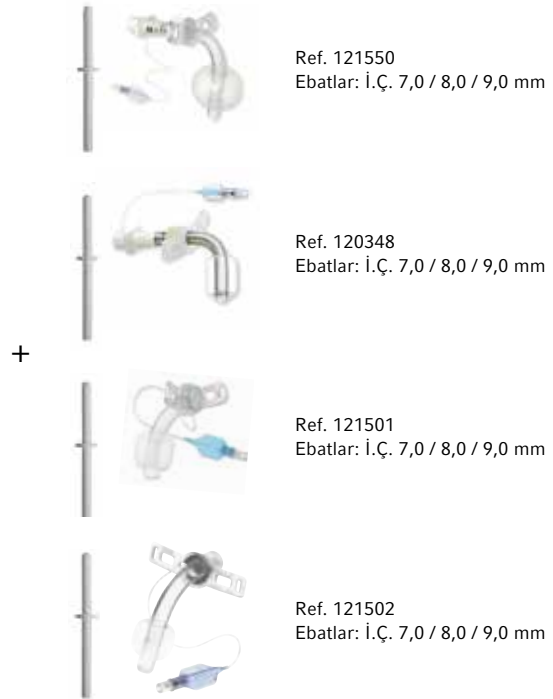

Belirtilen ebatlar her zaman kullanılan trakeostomi tüpünün ebadına karşılık gelir (bkz. sayfa 21)

PERCUQUICK® ÇOK ADIMLI

GELENEKSEL YÖNTEM: PERCUQUICK ÇOK ADIMLI DILATÖR SETİ

İlk adım dilatör ile uçları hidrofilik kaplama ile donatılmış ve ebada göre kademelendirilmiş diğer yedi dilatör içeren PercuQuick Çok Adımlı set, trakeostomanın atravmatik dilasyonunu mümkün kılar ve böylece komplikasyon riskini azaltır.



- ucun hidrofilik kaplaması dilasyonu kolaylaştırır ve penetrasyon için gereken kuvveti azaltır
- RÜSCH trakeostomi tüplerinin ucu dilatörlere özel olarak uyarlanmıştır ve bu sayede trakeostomadan nazik geçişe imkan tanır

PERCUQUICK SET



SET BİLEŞENLERİ

- dilatörler ve sarı kılavuz manşonu ile eksiksiz set
- İlk Adım dilatörü, delme kanülü, neşter, Luer-kilitli şırınga, boyun bandı ve J uçlu kılavuz teli içeren uygulama seti
- düşük basınçlı kaf ve takma dilatörü içeren PercuQuick trakeostomi tüpü
- steril
- tek kullanımlık

REF.	EBAT MM	MKTR
121549	7,0/8,0/9,0	1

TÜPLERİMİZLE BİR ARAYA GETİRME SEÇENEKLERİ

PERCUQUICK DEĞİŞİM SETİ

SET BİLEŞENLERİ

- İlk Adım dilatörü, delme kanülü, neşter, Luer-kilitli şırınga, boyun bandı ve J uçlu kılavuz teli içeren uygulama seti
- steril
- tek kullanımlık

REF.	MKTR
121551	1



+

PERCUQUICK DILATÖR SETİ

SET BİLEŞENLERİ

- 7 dilatör ve sarı kılavuz manşonu içeren set
- steril
- tek kullanımlık

REF.	MKTR
121553	1



+



Ref. 121550
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm



Ref. 120348
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm



Ref. 121501
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm



Ref. 121502
Ebatlar: İ.Ç. 7,0 / 8,0 / 9,0 mm

PERCUQUICK® TEK ADIMLI

HEPSİ BİR ARADA YÖNTEM:

PERCUQUICK TEK ADIMLI DILATÖR

Dilasyon, yalnız tek bir alet ile yürütülür. PercuQuick Tek Adımlı dilatörü hidrofilik kaplaması sayesinde en uygun dilasyon özellikleri sunar.

- Tek Adımlı ucun özel şekli yalnız tek adımda dilasyon sağlar
- daha fazla güvenlik ve daha iyi kullanım için şimdi durduruculu



PERCUQUICK TEK ADIMLI SET

SET BİLEŞENLERİ

- İlk Adım dilatörü, delme kanülü, neşter, Luer-kilitli şırınga ve J uçlu kılavuz teli içeren uygulama seti
- sarı kılavuz manşonu
- PercuQuick Tek Adımlı dilatör
- steril
- tek kullanımlık



PERCUQUICK TEK ADIMLI DILATÖR

RÜSCH

REF.	SİPARİŞ EBADI / D.Ç.	MKTR
121565	7,0 / 8,0 / 9,0 mm	1

REF.	SİPARİŞ BOYU	MKTR
121560	7,0/8,0/9,0	1